



[Fiche technique]

## Civière de relevage FERNO SCOOP EXL

Réf. 506000-506002

### **Civière de relevage pliable ergonomique et résistante.**

Radiotransparente, non magnétique et résistante à un grand nombre de produits chimiques.

En PEHD (Polyéthylène Haute Densité) et alliage d'aluminium.

Conçue pour le relevage d'une victime sans la manipuler grâce à ses ouvertures centrales permettant une séparation des 2 parties longitudinales.

Charnières invisibles permettant le pliage avant rangement.

Nettoyage et désinfection aisés.

Équipée du système breveté de double verrouillage pour une sécurité maximale Twin Safety Lock (TSL).

Réglable en longueur : Partie télescopique au niveau des pieds avec 4 positions de verrouillage (maximum 2,10 m).

10 poignées : 6 poignées latérales et 4 poignées situées aux extrémités.

Emplacement de tête ergonomique pour alignement du rachis cervical.

Forme concave garantissant le confort du patient tout en gardant plusieurs points de contact.

Isolation thermique immédiate grâce à la matière plastique qui compose la civière.

## **Informations complémentaires**

---

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ferno
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Dépliée 165 à 201 x 43 x 7 cm. Pliée 120 x 43 x 8 cm
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polymère haute densité translucide aux rayons X, imperméable et ne conduisant ni le chaud ni le froid
<b>Unité de vente</b>	A l'unité sous carton
<b>Poids</b>	8.9 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	227 kg
<b>Livré avec</b>	3 sangles noires de maintien marquées FERNO
<b>Normes et Certification</b>	Conforme EN 1865 DM de classe 1
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>La civière de relevage est munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger la victime.</p> <p>Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage.</p> <p>Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre.</p> <p>Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet.</p> <p>Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques.</p>
<b>Partie du corps</b>	
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 509820 - Support mural pour civière SCOOP 65 et SCOOP EXL Réf. 233111 - Housse de transport pour civière SCOOP ® Réf. 506012 - Articulations civière EXL Réf. 506011 - Kit d'extension pour civière Scoop TSL Expander Réf. 506014 - Immobilisateur de tête B Lock pour civière Scoop EXL

## Références

- Réf. 506002** Civière Ferno Scoop ® EXL - Jaune
- Réf. 506000** Civière Ferno Scoop ® EXL - Vert armée

## Photos

