



[Fiche technique]

## Coussin thermique Actipoche

Réf. 304176

### Poche chaud/froid réutilisable.

Permet de soulager rapidement la douleur par son action à chaud (thermothérapie) ou à froid (cryothérapie).  
En application locale.

Poche contenant du gel conservant le froid accumulé dans un congélateur ou le chaud emmagasiné dans un four à micro-ondes.

Le gel reste souple et la poche épouse parfaitement les formes des zones douloureuses à traiter.

## Informations complémentaires

Pratique : peut se conserver au congélateur pour être toujours prêt à l'emploi.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Actipoche
<b>Dimensions</b>	11 x 27 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Pratique : peut se conserver au congélateur pour être toujours prêt à l'emploi.
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Housse : tricot brossé en polyester Gel : Propylène glycol - Polyacrylate de sodium - Colorant - Eau
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Livré avec</b>	Housse de protection auto-agrippante
<b>Instructions d'utilisation</b>	A chaud : - Faire chauffer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle pendant 3 cycles de 15 secondes au four à micro-ondes (puissance 600 W), en le malaxant entre chaque cycle. - Immerger le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle pendant 1 minute dans une casserole d'eau chaude non bouillante hors du feu. A froid : - Placer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle dans le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. - Placer le coussin thermique ACTIPOCHE Moyen Modèle dans le congélateur pendant 20 minutes maximum.
<b>Entretien</b>	Lavage de la housse à la main ou en machine à 30°C, séparément.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3824909299
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2350023
<b>Étanche</b>	Non

## Photos

