



[Fiche technique]

## **Mannequin choking Charlie**

Réf. 321061

**Pack: 1 torse adulte, 4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport. Outil de formation à la méthode Heimlich. Risque: obstruction des voies respiratoires par un corps étranger.**

Tronc adulte simulant une victime en état de choc ne pouvant parler ou respirer en raison de l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger.

Conçu pour un entraînement à la manœuvre d'Heimlich et au coup de poing précordial.

Remplacement facile des pièces détachées.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Laerdal
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 102 x 53 x 29 cm
<b>Couleur</b>	Chair Clair
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	14.79 kg
<b>Livré avec</b>	4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mettre un peu de talc sur le corps étranger avant de le mettre dans la bouche dumannequin. A l'aide de votre index, pousser le corps étranger en passant le premier point de résistance jusque dans la gorge. NE PAS CONSERVER LE CORPS ETRANGER A L'INTERIEUR DE LA BOUCHE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE.
<b>Entretien</b>	Toujours travailler sur une surface propre. EVITER LES MARQUEURS, LES STYLOS ENCRE, L'ACETONE, L'IODINE OU AUTRES AGENTS TACHANT. NE PAS METTRE LE MANNEQUIN SUR DU PAPIER JOURNAL. Nettoyer avec du savon et de l'eau. NE PAS IMMERGER LE MANNEQUIN. Contrôler régulièrement le matériel. Le ranger correctement à la fin de chaque session de formation.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	102-00001
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie