



[Fiche technique]

Masque pour réanimation avec entrée d'oxygène

Réf. 321026 - 321029

Masque de bouche à bouche avec entrée oxygène

Spécialement conçu pour être utilisé par les sauveteurs professionnels et les premiers intervenants.

Offre une protection supplémentaire pour le sauveteur et la victime.

La distance entre le patient et le sauveteur permet d'observer la couleur des lèvres de la victime, les sécrétions et les mouvements de la poitrine.

Un modèle avec entrée d'oxygène facilite l'apport en oxygène supplémentaire aux patients avec respiration spontanée ou non.

Allie une valve unidirectionnelle de faible résistance à un filtre hydrophobe jetable 3M pour empêcher le passage de liquides et de sécrétions.

Bouffeur pré-gonflé pour faciliter l'application et offrir une parfaite étanchéité.

Peut être utilisé sur l'adulte, l'enfant et le nourrisson.

Informations complémentaires

Allie une valve unidirectionnelle de faible résistance à un filtre hydrophobe jetable 3M pour empêcher le passage de liquides et de sécrétions.

Bouffeur pré-gonflé pour faciliter l'application et offrir une parfaite étanchéité.

Peut être utilisé sur l'adulte, l'enfant et le nourrisson.

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	(Lxlxh) 13 x 11 x 4 cm
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Masque PVC
Poids	110 g
Livré avec	1 paire de gants et 1 lingette désinfectante
Instructions d'utilisation	Vérifiez que le filtre est solidement fixé et appuyez sur le dôme. Fixez la valve unidirectionnelle sur le port du masque. Placer l'extrémité portant la mention « nez » sur le nez du patient. Assurez l'étanchéité comme indiqué. Soufflez doucement jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Laissez le patient expirer.
Entretien	Valve et filtre à usage unique Lavez et frottez le masque dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-le à l'eau claire pendant au moins 1 minute. Immergez-le pendant 10 minutes dans une solution d'hypochlorite de sodium à 0,5 %. Rincez-le à l'eau courante pendant 3 minutes Laissez sécher complètement
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	

Références

- Réf. 321026** Masque pour réanimation avec étui rigide
- Réf. 321029** Masque pour réanimation avec pochette souple

Photos



Masque de bouche à bouche
avec entrée oxygène



Masque de bouche à bouche
avec entrée oxygène