



[Fiche technique]

Paire attache poignet SALVAFIX

Réf. 503975

Contention de sécurité à fermeture magnétique.

Système d'attache sûr, rapide et efficace.

Système utilisé pour l'immobilisation des patients agités.

Utilisé pour fixer les mains au cadre du lit ou du brancard.

Fermeture magnétique ne pouvant être ouvert qu'avec la clé magnétique de la gamme Salvafix.

Informations complémentaires

Parties matelassées de protection épaisses et enveloppantes.

Produit inflammable.

Caractéristiques techniques

Marque	Medicare System
Dimensions	Tour de poignet M : 14 - 20 cm.
Caractéristiques produit	Parties matelassées de protection épaisses et enveloppantes. Produit inflammable.
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	100% polyester. Absence de latex, de phtalates et de produit d'origine animale ou biologique.
Taille lettre	M
Livré avec	4 systèmes de fermeture magnétique avec 1 clé.
Instructions d'utilisation	Produit utilisé uniquement sur prescription médicale. Veillez à ce que la clé magnétique soit éloignée d'au moins 15 cm chez des patients avec régulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence ou un risque de tachycardie.
Entretien	Avant le lavage retirer les fermetures et la clé. Nettoyage en machine à 90° C maximum. Séchage en machine à une température modérée. Passage en tunnel de lavage possible. Nettoyer régulièrement la partie crochet de la fermeture « velcro » avec une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Autres options disponibles	Autres tailles disponible sur demande : 9 - 15 cm = S 14 - 25 cm = M/L 19 - 25 cm = L 24 - 30 cm = XL
Partie du corps	
Code SH	90211010
Référence fabricant (MPN)	3250
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 503976 - Clé magnétique bleue gamme SALVAFIX Réf. 503977 - Fermeture magnétique gamme SALVAFIX.

Photos

