



[Fiche technique]

## **Pansement compressif d'urgence stérile First Care**

Réf. 304250 - 304258

### **Pansement compressif à bague de serrage de type israélien.**

Permet de stopper de façon simple et efficace une hémorragie.

Tout en un intégrant une bague en plastique permettant un serrage suffisant et permanent de la bande.

Possibilité de le poser sur soi-même sans assistance et à une main.

Compresse non adhérente.

Possibilité d'obtenir un effet garrot en serrant fort la bande.

Utilisation possible pour une morsure de serpent.

Bande dotée du Stop&Go (sécurité anti-déroulement de la bande).

Poignée de compression intégrée.

Clip de fermeture intégré.

## **Informations complémentaires**

Stérilisation par rayonnements gamma.

Durée de vie 8 ans.

Températures de stockage : -10°C à 60°C

Températures d'utilisation : -10°C à 60°C

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Compresse (Lxl) 10 x 18 cm. Bande (Lxl) 4.4 m x 10 cm (longueur étirée). Longueur de la bande non étirée 180 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Stérilisation par rayonnements gamma. Durée de vie 8 ans. Températures de stockage : -10°C à 60°C Températures d'utilisation : -10°C à 60°C
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Sans latex
<b>Unité de vente</b>	Emballage sous vide.
<b>Poids</b>	66 g
<b>Normes et Certification</b>	N° OTAN (NATO NSN no.) : 6510-01-460-0849 ISO 13485
<b>Instructions d'utilisation</b>	Placer les compresses sur les blessures et dérouler le bandage autour de la partie blessée. Insérer la bande élastique dans l'applicateur de pression. Serrer puis continuer à dérouler la bande élastique en sens inverse de façon à ce que l'applicateur de pression appuie sur la compresse. Une fois la bande déroulée, fixer le tout en insérant l'extrémité de retenue entre les couches de pansement.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1s
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 270200 - Kit hémorragie externe secourbox Réf. 304259 - Pansement compressif israélien stérile First Care Blanc - Lot de 10

## Références

<b>Réf. 304250</b>	Pansement compressif First Care - Blanc
<b>Réf. 304258</b>	Pansement compressif First Care - Version militaire

## Photos

---

