



[Fiche technique]

Pansement hémostatique QuikClot Combat Gauze

Réf. 304070

Pansement coagulant hémostatique d'urgence conditionné scellé sous vide

Bande de gaze pliée en Z contenant du kaolin, agent hémostatique permettant l'accélération de la coagulation du sang pour une maîtrise efficace de l'hémorragie.

Application rapide et retrait facile de la bande de gaze, sans retrait du caillot formé ni déchirure de la bande.

Réservé aux intervenants d'urgence qualifiés et professionnels de santé.

DéTECTABLE aux rayons X.

Informations complémentaires

6 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide.

Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes.

Durée de vie : 5 ans.

Scellé sous vide.

Caractéristiques techniques

Marque	Quicklot
Dimensions	(IxL) 7,6 cm x 3,65 m (déplié)
Caractéristiques produit	6 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide. Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes. Durée de vie : 5 ans. Scellé sous vide.
Couleur	Ecrue, Bleu
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	22.7 g
Instructions d'utilisation	Placez la gaze QuikClot sur la plaie et utilisez-la pour exercer une pression directe sur la source du saignement. Au contact de la plaie, ce pansement hémostatique déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie. Lorsqu'il est en place, il suffit d'appliquer une compression de quelques minutes. Bandez la plaie pour maintenir la pression (avec un pansement compressif par exemple). Faites immédiatement appel à un médecin.
Classification	Dispositif medical de classe 2b
Partie du corps	
Code SH	3005901000
Référence fabricant (MPN)	200
Etanche	Non

Photos

