



[Fiche technique]

Poche de gel chaud - froid

Réf. 304806 - 304807 - 304808

Poche de gel réutilisable

Accumulateur réutilisable chaud/froid depuis une source externe.

La poche de gel est adaptée aux usages médicaux et domestiques.

Modelable, il ne durcit pas.

Fonction froid : Indiquée pour les traumatismes, entorses, hématomes, hyperthermie et la cryothérapie.

Fonction chaud : Pour les lombagos, torticolis, rhumatismes ou hypothermie.

A placer dans le congélateur, dans une casserole d'eau chaude ou dans le four micro-ondes selon l'utilisation désirée.

Non toxique.

Informations complémentaires

Durée de vie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Dispotech
Couleur	Bleu Roi
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	<p>Pour une utilisation au congélateur : Placer la poche de gel au minimum 2h au congélateur puis l'insérer dans une pochette ou dans un linge avant d'appliquer sur la zone.</p> <p>Pour une utilisation dans l'eau bouillante : Plonger la poche de gel dans l'eau bouillante pendant 5 mn maximum. Retirer le sachet de l'eau, le sécher et le mettre dans une pochette ou dans un linge avant d'appliquer sur la zone douloureuse.</p> <p>Pour une application au four à micro-ondes: Placer la poche de gel dans le four à micro-ondes à 650 W pendant 1 mn maximum. Retirer la poche de gel et la placer dans une pochette ou dans un linge.</p> <p>Envelopper toujours le sachet dans une pochette (non incluse) ou dans un tissu pour éviter les risques de brûlures.</p> <p>Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin.</p>
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 304806	Poche de gel chaud - froid - 11 x 11 cm
Réf. 304807	Poche de gel chaud - froid - 14 x 18 cm
Réf. 304808	Poche de gel chaud - froid - 17 x 26 cm

Photos

