



[Fiche technique]

Sac urinal avec substance absorbante Care Bag

Réf. 304771

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Boîte de 20

Sac urinal masculin avec un tampon super-absorbant et anti-odeurs gélifiant les matières et urines.
Remplace l'urinal plastique.
Permet d'uriner discrètement à tout moment.

Informations complémentaires

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.
Avec cordons de serrage coulissants.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Marque | Cleanis |
| Dimensions | (Lxl) 38 x 16 cm. Epaisseur 40 µ |
| Caractéristiques produit | Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%. Avec cordons de serrage coulissants. |
| Couleur | Blanc |
| Stérile | Non Stérile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) muni de doubles cordons de serrage. Tampon super-absorbant : support non-tissé à base de fluff (cellulose) et de Polymère Super-Absorbants (SAP) |
| Unité de vente | Lot de 20 |
| Instructions d'utilisation | Mode d'emploi : 1. Ouvrir la boîte et prendre un sac 2. Déplier le sac, l'ouvrir et le tenir avec les mains 3. Uriner dans le sac 4. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ 5. Pour fermer, tirer les cordons de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre puis nouer Elimination : Risque de pollution après incinération : conforme à la législation. Aucun rejet de dérivé chloré propre à la formation de dioxine. |
| Classification | Dispositif medical de classe 1 |
| Partie du corps | |
| Code SH | 5603149090 |
| Référence fabricant (MPN) | 7733993 |
| Etanche | Non |

Photos

