



[Fiche technique]

Sangle araignée pour plan dur

Réf. 509027 - 509026

Assure une immobilisation complète, rapide et facile du corps.

Conçue pour assurer une immobilisation complète, rapide et facile du corps, Particulièrement indiquée pour un usage sur tout type de plan dur et civières. Avec un anneau permettant de régler la hauteur de chaque sangle.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Couleur | Orange, Rouge, Jaune, Vert, Bleu Clair |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Toile en polypropylène avec attaches velcro |
| Unité de vente | boite de 5 |
| Instructions d'utilisation | Mode d'emploi : Avant utilisation de la sangle repérer les blessures du patient et faire attention à celles-ci. L'opération de sanglage du patient doit être réalisée par du personnel habilité et formé. Vérifier le produit avant son utilisation. 1- Placer le patient sur le plan dur . 2- Fixer les différentes parties du corps du patient sur le plan dur à l'aide de la sangle araignée. 3- Vérifier si les sangles maintiennent correctement le patient. 4- Au cours du transport du patient prêter attention aux scratches au niveau des cuisses du patient et les ajuster si nécessaire. |
| Entretien | Lavable en machine à 40°C. |
| Partie du corps | |
| Etanche | Non |

Références

Réf. 509027 Sangle araignée pour plan dur - Adulte
Dimensions : (Lxl) : 77 à 146 x 5 cm
Taille âge : Adulte
Poids : 398 g

Réf. 509026 Sangle araignée pour plan dur - Enfant
Dimensions : (Lxl) : 64 à 121 x 5 cm
Taille âge : Enfant
Poids : 296 g