



[Fiche technique]

## Simulation de brûlure grave

Réf. 333025

Très réaliste, souple, avec bords fins et transparents, la fausse plaie est mise en place très rapidement : pose en 1 minute.

Tenue 6 à 8 heures. Waterproof.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Dimensions</b>	(Lxl) 10 x 7 cm
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogénée, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Instructions d'utilisation</b>	Comment appliquer la fausse plaie ? Étape 1 : appliquer une fine couche de latex liquide Étape 2 : tapoter irrégulièrement du fard rouge Étape 3 : appliquer du fard jaune à l'endroit où vous désirez coller la fausse blessure Étape 4 : appliquer la colle pour fausse plaie à l'endroit souhaité Étape 5 : déposer la fausse plaie puis laisser sécher quelques minutes
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	PR07

## Photos

---

