



[Fiche technique]

## Stylo oculaire magnétique

Réf. 970900

### Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil

Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil.

De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboîter dans le corps du crayon.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	plastique rondelles en néoprène boucle en nylon
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	15 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	-Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018501000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	640

## Photos

---

